

BARRIER® Acute thoraxset



- All-in-one thoraxlaken met geïntegreerde incisiefolie
- Brede en lange incisiezone voor meer flexibiliteit en bereikbaarheid van de liezen
- Extra absorptievermogen rond de incisiezone
- Geïntegreerde transparante vochtvang-/ instrumentenzakken
- Ondoordringbaar materiaal over het volledige oppervlak
- Complementaire producten zoals slangenhouders en genitaal afdekdoek
- Absorberende onderlaag voor het comfort van de patiënt

Afdekinstructie



1. Start het afdekken met het genitale afdekdoek. Het zelfklevend afdekdoek van 75x75cm kan gebruikt worden als extra bescherming voor de halszone.



2. Verwijder het bovenste deel van het release papier van het thoraxlaken. Volg de aanwijzingen op de instructielabels.



3. Plaats het thoraxlaken over hals en borst. Verwijder het onderste deel van het release papier en bevestig het afdeklaken.



4. Vouw het laken open aan beide zijden.



5. Vouw vervolgens het laken open naar de voeten van de patiënt toe.




6. Vouw het bovenste deel van het thoraxlaken open, over het anesthesieframe. De fixatiestrips kunnen langs de anesthesiezijde worden bevestigd.



7. Wanneer de afzonderlijke slangenhouders en de defibrillatorzak op het laken zijn aangebracht, is de afdekking compleet.

Acute thoraxset / Ref. nr. 669600	Afmetingen
1 versterkte mayo overzettafelsloop	79x145cm
1 genitaal afdekdoek	18x40cm
4 handdoekjes	19x25cm
2 slangenhouders	2,5x30cm
1 zelfklevend afdekdoek	75x75cm
1 defibrillatorzak	33x38cm
2 OP-tape	9x49cm
1 thoraxlaken, incisiefolie 37x65cm	200/300x340cm
1 instrumentenveld	150x240cm

Verpakking: 3/6

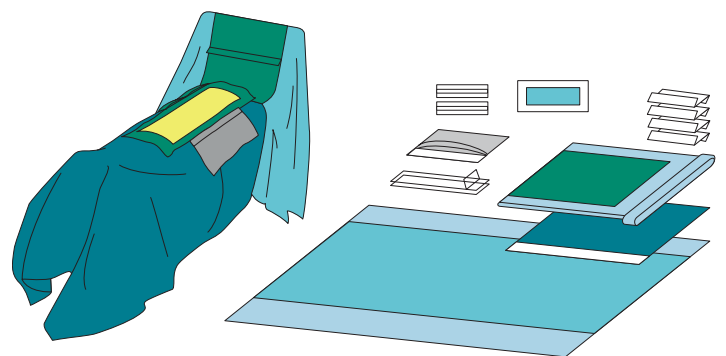

Meer informatie vindt u op www.molnlycke.nl en www.molnlycke.be

Mölnlycke Health Care BV, Postbus 3196, NL - 4800 DD Breda, Nederland. Tel. 076 521 96 63, Fax 076 522 17 82
 Mölnlycke Health Care NV, Berchemstadionstraat 72 bus 2, BE - 2600 Berchem, België. Tel. 03 286 89 50, Fax 03 286 89 52
 De Mölnlycke en BARRIER naam, logo en merknamen zijn wereldwijd geregistreerde handelsmerken van de Mölnlycke Health Care groep.
 © 2017 Mölnlycke Health Care. Alle rechten voorbehouden. (NLSUxxxx1709)

Mölnlycke[®]