



BARRIER® Schildklierlaken

- **Optimaal gevouwen** voor steriel gebruik, eenvoudig aan te brengen door één persoon
- **Doeltreffende absorptie** houdt het werkveld droog
- **Driedimensionaal ontwerp** voor een betere afdekking
- **Geïntegreerde transparante incisiefolie** voor een veilige fixatie

Instructies



1. Verwijder het release papier.



2. Plaats het afdeklaken op de hals van de patiënt en bevestig de zelfklevende folie (zie pictogram).



3. Vouw het afdeklaken eerst naar jezelf toe open, vervolgens naar de andere kant.



4. Vouw het afdeklaken open over het onderste deel van het lichaam.



5. Vouw tenslotte de bovenkant van het laken open over de anesthesieboog.



6. De patiënt is volledig afgedekt.

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking
65011	Schildklierlaken 175/250x302cm, incisiefolie 15x15cm	10/20

Dit afdeklaken is ook beschikbaar voor ProcedurePak® trays.

BARRIER afdeklakens

- 100% ondoordringbaar voor optimale veiligheid van de patiënt
- Gebruiksvriendelijke verpakking met handgrepen aan de dispenser doos

Find out more at www.molnlycke.com

Mölnlycke Health Care NV, Berchemstadionstraat 72 bus 2, B-2600 Berchem - Tel. 0032 (0)3 286 89 50, Fax. 0032 (0)3 286 89 52
Mölnlycke Health Care BV - Postbus 3196, NL-4800 DD Breda - Tel. 0031 (0)76 521 96 63, Fax. 0031 (0)76 522 17 82
www.molnlycke.com

De naam en het logo van Mölnlycke Health Care alsook het handelsmerk BARRIER® en ProcedurePak® zijn geregistreerde merken van de Mölnlycke Health Care groep. Copyright (2012)

