

# BARRIER® Hand-/voetlaken met Drisite® Plus



- Versterkte materialen in de kritieke zone zorgen voor een betrouwbare kwaliteit met een hoge scheurweerstand
- Drisite® Plus\* biedt een uitstekende absorptie en vochtafvoer
- Speciaal ontworpen voor zowel hand- als voetoperaties
- Ondoordringbare materialen voor een optimale patiëntveiligheid
- Optimale vouwwijze voor een steriele afdekking en drapeerbaarheid door één persoon



\* Drisite® Plus is een gepatenteerd vochtafvoersysteem met drie zones, samengesteld uit een droge, sterke en absorberende barrière.

# Afdekinstructie




**1. Voet afdekken:** Vouw het instrumentenveld open en leg deze onder het been van de patiënt. Leg het laken met het instructielabel in de juiste richting neer; de lange kant moet naar het hoofd wijzen.



**2.** Leg het hand-/voetlaken over de voet van de patiënt. Pak de voet van de patiënt door de elastische opening heen vast.



**3.** Vouw het laken over de voet.

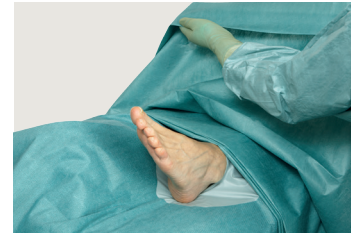

**4.** Vouw de bovenkant van het laken open over de anesthesieboog.



**1. Hand afdekken:** Vouw het instrumentenveld open en leg deze onder de hand van de patiënt. Leg het hand-/voetlaken neer in de richting die op het instructielabel staat.



**2.** Leg het hand-/voetlaken over de hand van de patiënt. Pak de hand van de patiënt door de elastische opening heen vast.



**3.** Vouw het laken over de anesthesieboog.



**4.** Vouw het laken over het voeteneinde van de OK-tafel.

Scan de QR code voor meer informatie over Mölnlycke of om de instructievideo te bekijken.



Ref. nr.	Beschrijving	Disp/Trp
60303	Hand/voetset 1 versterkte Mayo overzettafelsloop 79x145cm, 65x85cm absorberend 1 hand-/voetlaken 230x315cm, opening 3,5cm elastisch 1 versterkt instrumentenveld 150x190cm, 75x190cm absorberend	7/14
60302	Hand/voetset 1 hand-/voetlaken 230x315cm, opening 3,5cm elastisch 1 versterkt instrumentenveld 150x190cm, 75x190cm absorberend 1 inpakveld 100x100cm	7/14
60308	Hand-/voetlaken 150x180cm, opening 3,5cm elastisch	13/52
60309	Hand-/voetlaken 230x315cm, opening 3,5cm elastisch	11/22

Alle vermelde set componenten zijn ook beschikbaar als onderdeel van Mölnlycke® procedure trays.

Ref. nr.	Component Mölnlycke® procedure trays
70308	Hand-/voetlaken 150x180cm, opening 3,5cm elastisch
70309	Hand-/voetlaken 230x315cm, opening 3,5cm elastisch

Meer informatie vindt u op [www.molnlycke.nl](http://www.molnlycke.nl) en [www.molnlycke.be](http://www.molnlycke.be)

Mölnlycke Health Care BV, Postbus 3196, NL - 4800 DD Breda, Nederland. Tel. 076 521 96 63, Fax 076 522 17 82  
Mölnlycke Health Care NV, Berchemstadionstraat 72 bus 2, BE - 2600 Berchem, België. Tel. 03 286 89 50, Fax 03 286 89 52  
De Mölnlycke en BARRIERE naam, logo en merknamen zijn wereldwijd geregistreerde handelsmerken van de Mölnlycke Health Care groep.  
© 2017 Mölnlycke Health Care. Alle rechten voorbehouden. (NLSU00841709)

