



BARRIER® Verticaal isolatielaken

- Geïntegreerde vochttopvangzak voor een doeltreffende vochtafvoer
- Geïntegreerde rekbare kleefband voor een stevige bevestiging
- Optimale vouwwijze voor een steriele afdekking
- Ondoordringbare materialen voor een optimale patiëntveiligheid

Instructies



1. Houd het laken met het instructielabel in de juiste richting.



2. Verwijder de kleefstrook met behulp van één of twee personen. Let op de richting van de pijl.



3. Leg de incisiefolie over de patiënt.



4. Vouw het laken eerst aan de boven- en onderkant open en dan aan de linker- en rechterkant.



5. Bevestig de kleefstrook over het metalen frame aan de achterkant van het laken.



6. Open de vloeistofzak en sluit de zuigslang aan op de afvoeropening, indien nodig.

Ref. nr.	Beschrijving	Disp/Trp
903016	Verticale isolatieset 1 versterkte Mayo overzettafelsloop 79x145cm, 65x85cm absorberend 4 cellulose doeken 18x25cm 1 verticaal isolatielaken 330x240cm, incisiefolie 40x30cm 1 versterkt instrumentenveld 150x190cm, 75x190cm absorberend	6/12
903026	Verticale isolatieset 1 versterkte Mayo overzettafelsloop 79x145cm, 65x85cm absorberend 4 cellulose doeken 18x25cm 1 verticaal isolatielaken 330x240cm, incisiefolie 86x25cm 1 versterkt instrumentenveld 150x190cm, 75x190cm absorberend	4/8
903014	Verticale isolatieset 4 cellulose doeken 18x25cm 1 verticaal isolatielaken 330x240cm, incisiefolie 40x30cm 1 versterkt instrumentenveld 150x190cm, 75x190cm absorberend	7/14
826010	Verticaal isolatielaken 330x240cm, incisiefolie 86x25cm	7/14
826020	Verticaal isolatielaken 330x240cm, incisiefolie 40x30cm	10/20
80000527	Verticaal isolatielaken 320x240cm, incisiefolie 60x30cm	10/20

Alle vermelde set componenten zijn ook beschikbaar als onderdeel van Mölnlycke® trays.

Ref. nr.	Tray componenten
815300	Verticaal isolatielaken 330x240cm, incisiefolie 86x25cm
815301	Verticaal isolatielaken 330x240cm, incisiefolie 40x30cm
80008032	Verticaal isolatielaken 320x240cm, incisiefolie 60x30cm

Meer informatie vindt u op www.molnlycke.nl en www.molnlycke.be

Mölnlycke Health Care BV, Postbus 3196, NL - 4800 DD Breda, Nederland. Tel. 076 521 96 63, Fax 076 522 17 82.
Mölnlycke Health Care NV, Berchemstadionstraat 72 bus 2, BE - 2600 Berchem, België. Tel. 03 286 89 50, Fax 03 286 89 52.
De Mölnlycke® en BARRIER® merknamen, namen en logo's zijn wereldwijd geregistreerde handelsmerken van de Mölnlycke Health Care groep.
© 2017 Mölnlycke Health Care. Alle rechten voorbehouden. (NLSU00901702)

Mölnlycke®