



Alldress®

Absorberend, semi-permeabel zelfklevend verband


- all-in-one zelfklevend verband
- voor droge tot matig vochtige wonden
- kan gebruikt worden als primair of als secundair verband
- de film op de rugzijde zorgt voor een vochtige wondomgeving en beschermt de wond tegen water en bacteriën

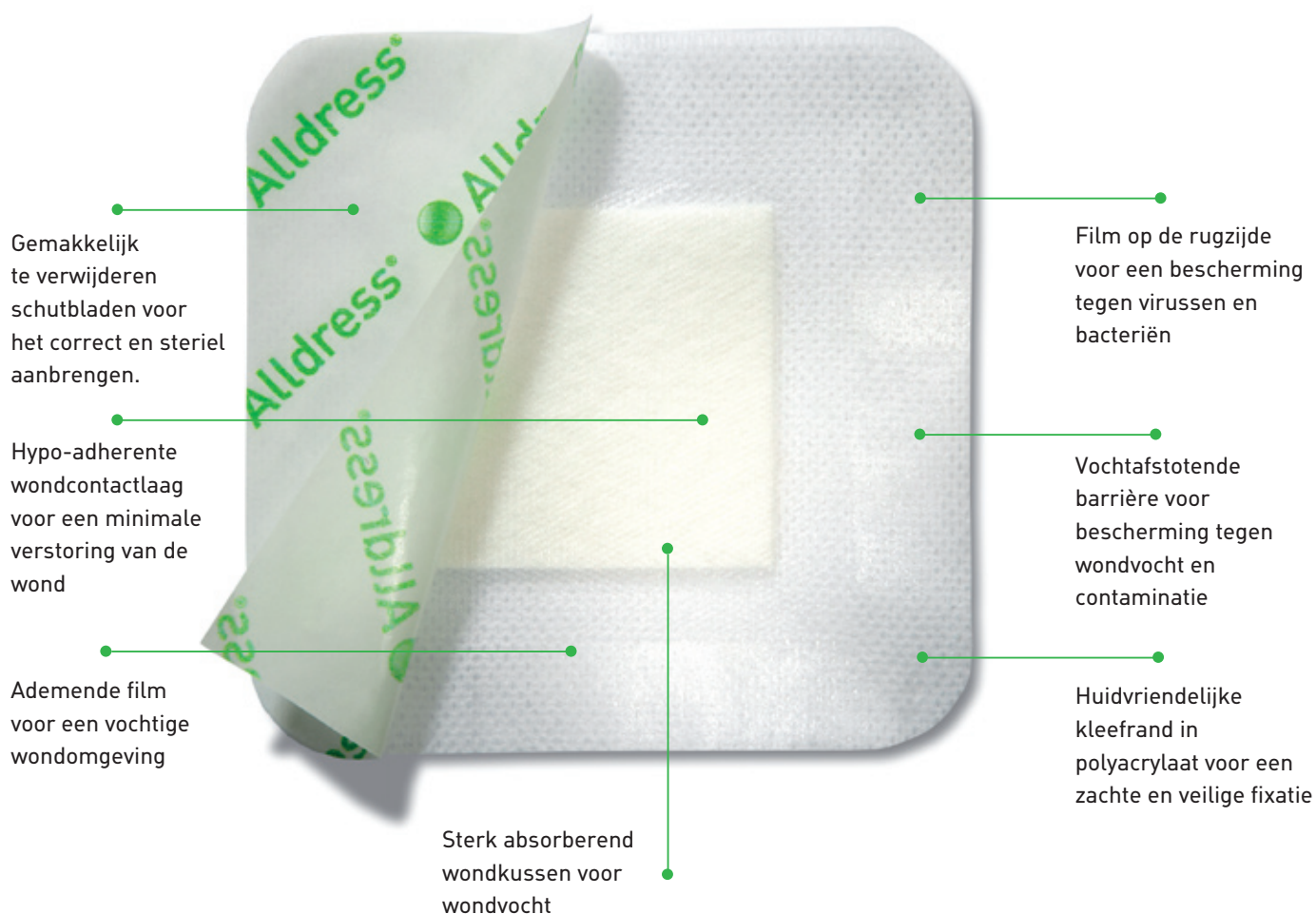


Gebruiksaanwijzing

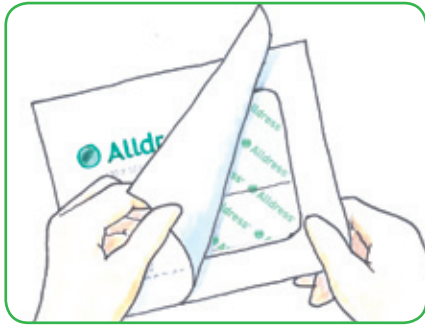

Haal het verband uit de verpakking.

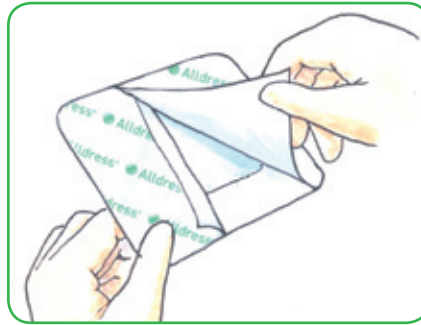

Verwijder één van de schutbladen zodat het verband al gedeeltelijk kan worden aangebracht.

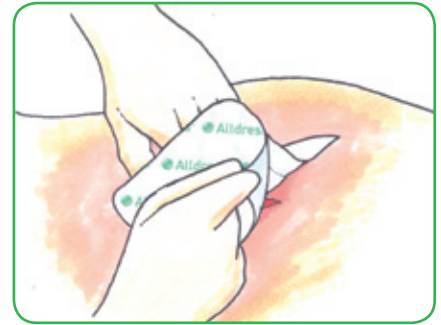

Plaats Alldress® voorzichtig op de huid en verwijder het tweede schutblad. Strijk de kleefrand glad zodat het verband goed kleeft. Vermijd uitrekken van het verband bij het aanbrengen.

Hoe werkt Alldress®?

Alldress® beschikt over een hypo-adherente wondcontactlaag. Het wondkussen absorbeert wondvocht en verkleint het risico op verweking van de omringende huid.

De huidvriendelijke kleefrand op waterbasis houdt het verband nauwkeurig op zijn plaats.

De semi-permeabele film zorgt voor een vochtig wondmilieu en is bestand tegen virussen en bacteriën. De film biedt tevens een waterdichte barrière.

Het gladde oppervlak vermindert de frictie met kleding of beddengoed en de kans op loskomen van het verband.

Voordelen van Alldress®

- De hypoadherente wondcontactlaag minimaliseert het verkleven in de wond.
- Zorgt voor een vochtig wondmilieu
- Minimaliseert de kans op maceratie
- Patiënt kan douchen met het verband
- Beschermde wond tegen water, bacteriën en virussen
- Gemakkelijk te verwijderen schutbladen die een veilig en steriel gebruik toelaten
- Huidvriendelijke kleefrand op waterbasis
- Hoge absorptiecapaciteit

Toepassingen

Voor een brede toepassing bij droge tot matig vochtige wonden:

- Als primair verband voor open en gesloten wonden
 - veneuze en diabetes wonden, doorligwonden
 - chirurgische wonden
 - scheurwonden
 - oppervlakkige brandwonden
- Als secundair verband voor open wonden in combinatie met:
 - gels (bv. Hypergel® en Normlgel®)
 - reinigende verbanden (bv. Mesalt®)
 - alginaten (bv. Melgisorb®)

Hoe frequent vervangen?

Alldress® kan meerdere dagen op de wond blijven, afhankelijk van de wondconditie of zoals voorgeschreven. Om het verband te verwijderen dient men een hoek op te heffen en het verband zachtjes in de richting van de haargroei eraf te trekken.

Voorzorgsmaatregelen

Enkel na positief advies van een wondzorgspecialist mag Alldress® gebruikt worden bij geïnfecteerde wonden.



Assortiment Alldress (steriel)

Afmeting	Z-indexnr.	Art.nr.	Binnenverp.	Transportverp.
10 x 10 cm	14196239	265320	10 x 1 stuk	100 stuks
15 x 15 cm	14196247	265340	10 x 1 stuk	100 stuks
15 x 20 cm	14196255	265360	10 x 1 stuk	100 stuks